

Link do produktu: <https://milababy.pl/torebki-do-przechowywania-pokarmu-woreczki-na-mleko-do-mrozenia-i-lodowki-20szt-150ml-samoprzylepne-etykiety-p-372.html>



## Torebki do przechowywania pokarmu woreczki na mleko do mrożenia i lodówki 20szt 150ml + samoprzylepne etykiety

Cena brutto	<b>34,00 zł</b>
Cena netto	<b>27,64 zł</b>
Numer katalogowy	<b>1074803356</b>
Kod producenta	<b>#C340A</b>
Kod EAN	<b>5903407700014</b>

### Opis produktu

- ♥ Konstrukcja dna woreczka ułatwia postawienie go w pozycji pionowej bez ryzyka rozlania.
- ♥ Każda torebka została poddana dokładnej sterylizacji, co zapewnia utrzymanie wysokiej jakości pokarmu.
- ♥ W zestawie są samoprzylepne etykiety, na których można zapisać termin przydatności mleka.

W opakowaniu znajduje się 20 torebek i 20 etykiet samoprzylepnych

Pojemność torebki 150 ml.

Torebki przeznaczone są do przechowywania pokarmu w lodówce lub zamrażarce.

Wykonane zostały z materiału przeznaczonego do kontaktu z żywnością.

Do użytku jednorazowego.

Nigdy nie podgrzewaj w nich pokarmu w kuchence mikrofalowej oraz nie dezynfekuj.

Etykieta umożliwi opisanie odciągniętego pokarmu. Oznacz torebkę jeszcze przed nalaniem pokarmu do środka. Otwórz woreczek przecinając go powyżej strunowego zamknięcia. Ułóż woreczek w pozycji pionowej, aby podstawa znalazła się na dole. Dla zachowania sterylności torebki nie wkładaj palców do jej wnętrza ani nie wdmuchuj powietrza. Wlej pokarm do otwartego woreczka. Uważaj, aby nie przekroczyć linii maksymalnej pojemności. Spłaszcz górną część torebki powyżej poziomu mleka, aby usunąć nadmiar powietrza a następnie ściśnij zamknięcie strunowe.

Ważne! Wyrób sprawdzać przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia – wyrzucić. Uwaga! Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dziecka.

Długi okres przechowywania mleka w zamrażalniku jest bezpieczny i wygodny. Pamiętaj jednak, że potrzeby dziecka zmieniają się bardzo szybko. Organizm karmiącej mamy sam dostosowuje na bieżąco skład pokarmu do rozwoju dziecka. Natomiast mleko, które odciągnęłaś miesiąc czy pół roku temu może nie zaspokoić potrzeb żywieniowych starszego już dziecka. Zamrożone mleko może być rozmrażane przez całą noc w lodówce, następnie podgrzewane stopniowo w podgrzewaczu lub w gorącej wodzie. Zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu przed karmieniem. Nigdy nie rozmrażaj pokarmu w kuchence mikrofalowej. W ten sposób pozbawisz go cennych wartości i przeciwiała. W przypadku rozwarstwienia składników po rozmrożeniu pokarmu – wymieszaj go. Świeżo ściągnięty pokarm przechowuj temperaturze pokojowej do 4 godzin, w lodówce (+4°C) do 96 godzin, w zamrażalniku (-20°C) 3-6 miesięcy.

---

Rozmrożony pokarm przechowuj w lodówce (+4°C) maksymalnie do 24h.

Ważne! Nie łącz świeżo ściągniętego pokarmu z rozmrożonym. Nigdy nie zamrażaj ponownie mleka wcześniej rozmrożonego. Mleko, które nie zostało zużyte należy wyrzucić